

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™



Intego

Rendimiento en el que  
puede confiar

[dentsplysirona.com](http://dentsplysirona.com)





## Su socio de confianza

Intego es la mejor unidad de tratamiento en su categoría. Se basa en la capacidad de innovación y el diseño premiado de nuestras unidades de tratamiento actuales. Como socio de confianza para una clínica eficiente, Intego tiene todas las características necesarias para ofrecer un apoyo óptimo: un diseño ergonómico para una dinámica de trabajo mejorada, unos estándares de calidad elevados tanto desde el punto de vista del procesamiento como del diseño, y una excelente relación precio-prestaciones. Por todo ello, Intego representa nuestra categoría de rendimiento.

### Excelente relación precio-prestaciones

Alto rendimiento y funciones innovadoras al mejor precio, opciones personalizadas para una máxima rentabilidad.

### Diseño ergonómico

Diseñado para un manejo intuitivo y un flujo de trabajo optimizado e integrado.

### Calidad «Made in Germany»

Procesos de control de calidad definidos, materiales duraderos, diseño resistente y "a prueba de futuro".

### Intego TS (diseño de mangueras colgantes)

- Posicionamiento ergonómico del elemento odontológico, gracias a un sistema de brazo soporte con un amplio rango de movimiento
- Sistema de bandeja funcional con bandeja extraíble y posicionamiento flexible
- Concepto de prevención de infecciones integrado y completo para unos resultados óptimos



## Excelente relación precio-prestaciones en la que puede confiar

Su trabajo cotidiano es complejo y exige una unidad de tratamiento que cumpla numerosos requisitos individuales. Intego pone a su disposición la solución perfecta: puede elegir entre dos conceptos de unidad de tratamiento, ambos con una configuración flexible. Tanto si opta por el diseño con brazo colibrí como por el diseño con mangueras colgantes, obtendrá el máximo rendimiento a un precio justo.

### Las ventajas de un vistazo

- Unidad de tratamiento con unidad de agua compacta para un uso óptimo del espacio en su consulta.
- Panel de mando EasyPad para un manejo sencillo e intuitivo.
- Elemento auxiliar compacto con amplia libertad de movimiento.
- Control de la calidad del agua a través del suministro propio con una botella de agua fresca.
- Posibilidad de elegir entre la variante TS con mangueras colgantes y la CS con brazo colibrí.

### CS : El diseño con brazo colibrí



El **diseño con brazo** colibrí es ideal para la mayoría de situaciones de tratamiento de odontología con trabajo a dos o cuatro manos. El elemento odontológico se puede girar hasta 240° para un posicionamiento óptimo. La distancia máxima entre el elemento odontológico y los instrumentos es de 90 cm.

**Un mundo elegante**

Combinaciones clásicas y atemporales para un aspecto excepcional de alta gama.

**Un mundo natural**

Tonos suaves y cálidos para crear un ambiente de tratamiento relajante.

**Un mundo vital**

Colores vivos y tonos brillantes para un ambiente moderno y animado.



\* Colores disponibles para el acolchado Lounge.

# Diseño ergonómico en el que puede confiar

La unidad de tratamiento es la esencia de su consulta. Con Intego hemos logrado combinar a la perfección la estética y la funcionalidad, de modo que usted pueda trabajar cómodamente en condiciones óptimas. Además del diseño armonioso de los componentes perfectamente integrados y de la amplia variedad de colores, las unidades de tratamiento Intego cumplen los criterios más rigurosos de nuestro concepto de ergonomía. Intego se adapta así al estilo de su consulta y a su propio gusto.

## Opciones de acolchado

**Acolchado Premium**

Este acolchado de alta calidad y sin costuras garantiza la máxima comodidad, incluso durante tratamientos de larga duración.

**Acolchado Lounge**

Su superficie está confeccionada con un material mullido y agradable y un relleno cómodo para una relajación máxima. Superficie contorneada para un posicionamiento perfecto.

**Diseño galardonado**

Muchos de los productos Dentsply Sirona han recibido prestigiosos premios de diseño, entre ellos, el premio Red Dot Design Award, el iF Product Design Award Gold, el iF Communication Design Award, y el Good Design Award.



## Resultados perfectos

Cada tratamiento supone un proceso complejo. El diseño ergonómico de nuestros productos permite un acceso óptimo al paciente y un proceso de tratamiento sin complicaciones y de gran comodidad para éste. Intego combina todas las dimensiones de la ergonomía a fin de facilitar al odontólogo la realización del tratamiento. Conseguirá resultados perfectos, incluso tras largas jornadas, gracias a su experiencia y con el apoyo de nuestra unidad de tratamiento.



### 1 Asiento intuitivo

- **Más libertad de movimiento**  
Respaldo fino para una perfecta libertad de movimiento de piernas y un posicionamiento flexible del mando de pedal
- **Posicionamiento óptimo de los instrumentos**  
Coordinación perfecta entre el elemento odontológico y el auxiliar, posicionamiento flexible de la bandeja adicional en las variantes de brazo colibrí y de mangueras colgantes.
- **Taburetes cómodos**  
Hugo, Carl, Paul

### 2 Posicionamiento cómodo

- **Ajuste perfecto de la unidad de tratamiento**  
Ajuste flexible de la altura, escupidera giratoria
- **Mayor comodidad para el paciente**  
Sistema progresivo de elevación del sillón, reposabrazos, reposapiés Vario, acolchado cómodo, ErgoMotion

### 3 Visibilidad óptima

- **Perfecta iluminación de la zona de tratamiento**  
LEDview Plus o LEDlight y luz LED para instrumentos
- **Apoyacabezas flexibles**, planos o con doble articulación
- **Imágenes intraorales perfectas**  
Sirocam F, AF o AF+ con pantalla HD de 22" en la unidad de tratamiento

### 4 Flujo de trabajo integrado

- **Funcionamiento intuitivo**  
Panel de mando EasyPad o pantalla táctil EasyTouch
- **Funciones integradas del tablero de instrumentos**  
Control del par de giro integrado para tratamientos de endodoncia, ApexLocator en EasyTouch
- **Equipamiento moderno**  
Instrumentos innovadores, sistema avanzado de comunicación con el paciente Sivision, interfaz USB y Ethernet

## Resultados perfectos

- Clínicamente perfecto
- Estéticamente perfecto
- Perfecto para el éxito de su consulta

- 1 Sprayvit E**  
Visibilidad óptima gracias a la luz LED integrada.
- 2 Motor BL ISO E**  
Motor sin escobillas esterilizable con control de velocidad y par durante el tratamiento. Especialmente ligero, compacto y con una amplia gama de velocidades.
- 3 Scaler SiroSonic L**  
La pieza de mano y las puntas se pueden esterilizar. Oscilación controlada y en línea recta con control electrónico de la potencia y control del agua.
- 4 Sirocam F, AF o AF+**  
Imágenes intraorales detalladas con la cámara de fácil manejo SiroCam F o AF/AF+ con enfoque automático.



### Sistemas de archivos recíproco

Intego ambidiestros integra un sistema de archivos recíproco de Dentsply Maillefer y VDW, permitiendo un uso rápido y fácil del sistema de archivos más común.

WaveOne®    WaveOne® Gold    Reciproc®  
Reciprocating Files    One file endo

## Manejo intuitivo

Los tratamientos complejos requieren la máxima concentración. Por esta razón, Intego presenta un programa intuitivo con dos modernas interfaces de usuario de uso intuitivo e instrumentos innovadores para un tratamiento sin estrés. De esta forma podrá concentrarse en lo que realmente importa: en su paciente y en un resultado perfecto del tratamiento.

### Interfaces modernas e intuitivas



#### EasyPad

Interfaz de usuario intuitiva y clara, un componente estándar en Intego.



#### EasyTouch

Esta interfaz de usuario se puede integrar de forma opcional. Mayor comodidad de manejo gracias a la clara tecnología de pantalla táctil y al número añadido de posibilidades de manejo y visualización.

### Posibilidades de integración para los tratamientos de endodoncia



#### ApexLocator

Es posible integrar un ApexLocator (localizador apical) en el EasyTouch para controlar en todo momento la profundidad de trabajo durante el tratamiento de endodoncia y reducir la exposición a los rayos X.



#### Control de par integrado

Permite regular la velocidad y el par, el motor se detiene de forma automática al alcanzar el par de giro máximo configurado. Esto proporciona seguridad y un flujo de trabajo perfecto durante el tratamiento de endodoncia.

## Increíble comodidad para el paciente

Sus pacientes también apreciarán este confort: El sillón dental Intego cuenta con un diseño ergonómico que, junto con el apoyacabezas, resulta especialmente cómodo para el paciente. La altura del sillón se puede bajar lo suficiente para adaptarse incluso a los clientes de estatura más baja, de modo que puedan sentarse y levantarse del mismo con facilidad. No cabe duda de que los pacientes que están cómodos se sienten más seguros y permanecen fieles a su clínica.



**NOVEDAD:** El concepto ErgoMotion exclusivo de Dentsply Sirona para la familia Intego

### Sus ventajas

- Mejor posicionamiento para el tratamiento maxilar y mandibular
- Menor sobrecarga para la cabeza del paciente
- Sin sobrecarga ni compresión en la columna vertebral del paciente
- Sin necesidad de reajustes en el reposacabezas

### Apoyacabezas de doble articulación

Se ajusta rápidamente a las distintas situaciones de tratamiento así como a las distintas estaturas de los pacientes.

### Acolchado Premium/Lounge

Este acolchado de alta calidad garantiza la máxima comodidad, incluso durante tratamientos de larga duración.

### NOVEDAD: ErgoMotion

La inclinación del respaldo se adapta al movimiento de la columna vertebral del paciente para evitar los efectos de estiramiento y compresión.

### Reposabrazos

Sus pacientes pueden descansar los brazos cómodamente.

### Sistema de elevación

El extraordinario sistema de elevación coloca suavemente al paciente en la posición correcta.

### Reposapiés Vario

El reposapiés Vario, que forma parte del acolchado Premium, se puede extender fácilmente para lograr un posicionamiento ergonómico, incluso en el caso de pacientes de gran estatura.

## Seguridad en la que puede confiar

Los odontólogos de todo el mundo son sumamente exigentes cuando se trata de la seguridad de sus pacientes y del personal de sus consultas. El concepto de prevención de infecciones Intego está diseñado para que usted pueda cumplir rápida y fácilmente todas las normas de control de infecciones. El diseño del elemento auxiliar y de la unidad de agua aumenta la simplicidad y la eficacia de los procesos de prevención de infecciones. Todo esto garantiza un control perfecto de las infecciones.

**Escupidera**  
Extraíble y giratoria, de limpieza sencilla y fácil acceso.

**Función de purga**  
Enjuaga de forma automática todos los instrumentos por los que circula agua, por el lado del auxiliar y del odontólogo.

**Sistemas de aspiración**  
Compatibles con todos los sistemas convencionales de aspiración húmeda y en seco, incluido el separador de amalgama.

### Intego

La unidad de agua y el elemento auxiliar Compact se pueden adaptar a las exigencias y requisitos más diversos gracias a los sistemas de aspiración y las opciones de libre selección.



#### Botella de agua fresca

Para el control de calidad del agua. También puede rellenarse con la solución Dentosept para una desinfección permanente y un saneamiento manual.



#### Limpieza automática de los tubos flexibles de aspiración

Adaptador de limpieza para el enjuague automático del extractor de saliva y del aspirador de neblina de spray.



#### Superficies lisas

El diseño continuo y sin ranuras de la superficie permite una reducción máxima de los gérmenes en el menor tiempo posible.

## Flexible de cara al futuro

En una buena consulta, la configuración individual supone un importante factor de comodidad. Por esta razón, el equipamiento de Intego se puede configurar de la forma que mejor se adapte a su labor durante el proceso de tratamiento. Sin embargo, nuestro concepto de flexibilidad abarca aún más, ya que es posible configurar Intego con opciones técnicas e interfaces, a fin de disponer de un equipamiento con miras al futuro.

### Numerosos modelos

#### Selección entre dos apoyacabezas

El apoyacabezas plano se puede ajustar de forma rápida y flexible. También puede elegir de manera opcional un apoyacabezas de doble articulación para un posicionamiento más sencillo y una visibilidad óptima, incluso en zonas con visibilidad reducida.



Apoyacabezas plano



Apoyacabezas de doble articulación

#### Dos lámparas de tratamiento: Iluminación óptima siempre

Las dos opciones de lámparas LED ofrecen la mejor iluminación sobre la zona del tratamiento. Nuestra lámpara de tratamiento premium LEDview Plus ofrece una luz natural perfecta, gracias a sus LED multicolor y a sus sofisticadas características técnicas.



LEDlight



LEDview Plus

#### Elemento auxiliar: Confort o Compact

Ambos elementos auxiliares presentan un diseño compacto y garantizan una máxima libertad de movimiento. La variante Confort ofrece un trabajo cómodo, incluso sin la intervención de un ayudante.



Elemento auxiliar Confort



Elemento auxiliar Compact

#### Equipamiento ultramoderno

Las cámaras SiroCam F/AF/AF+ con enfoque automático combinan una calidad de imagen superior con un manejo sencillo.



	SiroCam F	SiroCam AF	SiroCam AF+
<b>Enfoque</b>	Enfoque fijo	Enfoque automático	Enfoque automático
<b>Formato de imagen 16:10</b>	✓	✓	✓
<b>Píxeles (utilizables)</b>	0,42 megapíxeles	0,65 megapíxeles	1,00 megapíxeles
<b>Espacio de trabajo</b>	✓ 5-20 mm	✓ 2-130 mm	✓ 2-130 mm
<b>Resolución de imagen en directo</b>	824 x 514	824 x 514	824 x 514
<b>Resolución de imagen fija</b>	824 x 514	1024 x 640	1276 x 796

### Diseño "a prueba de futuro"

#### Interfaces: flexibles de cara al futuro

La interfaz de red en el sillón dental y la conexión USB en el elemento odontológico o auxiliar le permiten integrar nuevas funciones y conectar su consulta a la red. Incluso el análisis de fallos por parte del servicio técnico se simplifica notablemente.



Interfaz USB integrada

#### Pantalla Sivision 22" AC

Con esta pantalla HD, puede explicar imágenes de la cámara intraoral y radiológicas, vistas del software y de la planificación, vídeos y presentaciones en PowerPoint a sus pacientes directamente en la unidad de tratamiento.



Pantalla Sivision 22" AC

# Calidad en la que puede confiar

Nuestro objetivo no es solamente satisfacer a nuestros clientes, sino impresionarlos. Por este motivo, la calidad, el rendimiento y el servicio constituyen nuestro principal foco de atención. Las unidades de tratamiento de Dentsply Sirona combinan una alta calidad con auténticas innovaciones que mejoran de forma perceptible la comodidad del tratamiento y el flujo de trabajo.

## Fiabilidad y durabilidad



Las pruebas de calidad complejas y precisas junto con la solidez de los materiales convierten a Intego en una unidad de tratamiento de confianza con una vida útil superior a la media.

## Alta calidad



En Intego, nuestro gusto por el detalle se aprecia de forma inmediata. Los materiales empleados (plásticos resistentes y moldeables, componentes de acero y de aluminio sólidos, vidrios y materiales de acolchado de alta calidad) cumplen los elevados requisitos de calidad propios de un producto Premium.

## Altos estándares



Dentsply Sirona, líder en tecnología con una trayectoria de innovación de más de 130 años. Nuestros ingenieros y científicos del departamento de investigación y desarrollo no solo se centran en la innovación, sino también en la calidad.

## Diseño "a prueba de futuro"

En el centro de innovación de Dentsply Sirona, se anticipan tendencias de futuro y se preparan productos para afrontar los futuros retos tecnológicos.



# Configuración individual

Usted puede configurar la unidad de tratamiento Intego de forma que se ajuste perfectamente a sus necesidades y a la relación precio-prestaciones que desee.

## Intego

Unidad básica	Versión	Paquetes de usuario	Paquetes de opciones
<p><b>Sillón dental</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acolchado Premium</li> <li>• Apoyacabezas plano</li> <li>• Mando de pedal neumático de instrumentos</li> </ul> <p><b>Elemento odontológico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 posiciones de instrumentos</li> <li>• Panel de mando EasyPad</li> <li>• Alimentación para 2 accionamientos</li> </ul> <p><b>Elemento auxiliar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versión Compact en un brazo giratorio montado directamente en la escupidera</li> <li>• 4 posiciones de instrumentos</li> <li>• Extractor de saliva y dispositivo de aspiración</li> </ul> <p><b>Unidad de agua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño compacto</li> <li>• Aspiración húmeda estándar</li> <li>• Preparación para la integración de una botella de agua fresca</li> <li>• Enjuague con función de giro manual</li> </ul>	<p><b>Versión TS con mangueras colgantes</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• La altura del elemento odontológico se puede regular y fijar gracias al freno neumático</li> <li>• Diseño ergonómico mediante un elemento odontológico de posicionamiento flexible, con portabandejas móvil</li> <li>• Amplia superficie para instrumentos en el elemento odontológico y en el portabandejas</li> </ul> <p><b>Versión CS con brazo colibrí</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para la mayor parte de situaciones de tratamiento de odontología, ya impliquen trabajo a dos o a cuatro manos</li> <li>• Alcance optimizado de las mangueras de los instrumentos: hasta 90 cm</li> <li>• La altura del elemento odontológico se puede regular y fijar gracias al freno neumático</li> </ul>	<p><b>Inicio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeringa triple estándar</li> <li>• Fuente luminosa en el elemento odontológico</li> <li>• 2 mangueras de turbina</li> <li>• LEDlight*</li> </ul> <p><b>Innovación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mando de pedal electrónico C+</li> <li>• Sprayvit E en el elemento odontológico</li> <li>• Fuente luminosa en el elemento odontológico</li> <li>• 1 manguera de turbina</li> <li>• 1 micromotor BL ISO E</li> <li>• Scaler Sirosonic L</li> <li>• LEDview Plus</li> </ul> <p><b>Ergo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ErgoMotion</li> <li>• Sistema de elevación del sillón 185 kg</li> <li>• 2 reposabrazos</li> <li>• Apoyacabezas con doble articulación</li> </ul> <p><b>Advance</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mando de pedal electrónico C+</li> <li>• Sprayvit E en el elemento odontológico</li> <li>• Fuente luminosa en el elemento odontológico</li> <li>• 1 manguera de turbina</li> <li>• 1 micromotor BL ISO E con electrónica de alimentación</li> <li>• LEDlight*</li> </ul> <p><b>Touch Plus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mando de pedal electrónico C+</li> <li>• 1 micromotor BL ISO E con alimentación</li> <li>• 1 manguera de turbina</li> <li>• Fuente luminosa en el elemento odontológico</li> <li>• Interfaz de usuario EasyTouch</li> <li>• LEDview Plus</li> </ul> <p><b>Endo Pro**</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control de par integrado</li> <li>• ApexLocator</li> <li>• Endo 6:1 contra-ángulo</li> <li>• e-Control</li> </ul> <p><small>** LEDview Plus con recargo ** Solo con interfaz de usuario EasyTouch.</small></p>	<p><b>Sivision Ready</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfaz USB en el elemento odontológico o auxiliar</li> <li>• Interfaz de red</li> </ul> <p><b>Sivision Inicio</b></p> <p><b>Con/sin pantalla</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfaz USB en el elemento odontológico o auxiliar</li> <li>• Interfaz de red</li> <li>• SiroCam F (SiroCam AF o AF+ con recargo)</li> <li>• Pantalla adaptada a la barra de la lámpara de tratamiento</li> <li>• Opcional: Pantalla 22" AC</li> </ul>

# Sus opciones individuales

Aquí puede consultar la lista completa de opciones individuales y comprobar qué equipamiento se incluye en las unidades básicas.

Sillón dental	
2 posiciones de tratamiento, posición S y O	■
Caja de conexiones integrada	■
Sistema de elevación del sillón 140 kg	■
Apoyacabezas plano	■
Apoyacabezas de doble articulación	□Er
Acolchado Premium	■
Acolchado Lounge	□
ErgoMotion	□Er
Mando de pedal en cruz	□
Cojín elevador para pacientes de baja estatura	□
Reposabrazos derecho	□Er
Reposabrazos izquierdo	□Er
Juego de válvulas para dispositivos externos	□
Juego de reducción de presión de vacío	□
Juego de montaje de cubierta	□
Caja de conexiones externa	□
Placa de ajuste	□

Elemento odontológico	
Brazo soporte de altura regulable, frenado neumático	■
5 posiciones de instrumentos	■
Alimentación hidroneumática para 2 accionamientos sin fibra óptica	■
Mando de pedal neumático de instrumentos	■
Mando de pedal electrónico C+	□A, I, T
Panel de mando EasyPad con 2 configuraciones específicas de usuario	■
Panel de mando EasyTouch con 4 configuraciones específicas de usuario	□J
Sprayvit E con luz	□A, I
Sprayvit E con luz (botón del agua a la izquierda)	□A, I
Jeringa triple estándar	□D
Manguera de turbina con luz	□2xS, A, I, T
Manguera de turbina Borden	□
Primer motor BL ISO E con manguera	□A, I, T
Segundo motor BL ISO E con manguera	□
Scaler SiroSonic L	□I
Tercer accionamiento	□
Juego de fuente luminosa intraoral para turbina y Sprayvit E	□S, A, I, T
Control de par para tratamientos de endodoncia	□E
eControl: Rango de velocidad de 100 - 40.000 rpm	□E
ApexLocator integrado	□E
Endo 6:1 contra-ángulo	□E
Negatoscopio intraoral	□
Función de purga y saneamiento manual	□
Tapete de silicona para elemento odontológico TS	□
Portabandejas CS adicional para 1 bandeja de tamaño estándar	□
Portabandejas TS/CS adicional para 2 bandejas de tamaño estándar	□
Tapete de silicona para elemento odontológico CS	□
Tapete de silicona para el elemento de mando para asas	□

Elemento auxiliar	
Elemento auxiliar Compact, con el brazo giratorio montado directamente en el brazo de la escupidera	■
Elemento auxiliar Confort, ideal para los tratamientos a dos manos	□
4 posiciones de los instrumentos	■
Extractor de saliva y dispositivo de aspiración	■
Sprayvit E con luz	□
Sprayvit E con luz (botón del agua a la izquierda)	□
Jeringa triple estándar	□
2º juego de aspiración	□
Lámpara de polimerización Satelec Mini LED	□
Panel de mando	□
Fuente luminosa para Sprayvit E	□
Tapete de silicona para el elemento auxiliar Confort	□

Unidad de agua	
Preparada para botella de agua fresca	■
Escupidera con función de giro manual	■
Unidad de agua sin escupidera	□
Preparada para aspiración húmeda estándar	■
Preparada para aspiración húmeda estándar con control de aspiración automático	□
Válvula multiestación	□
Válvula de escupidera para aspiración húmeda estándar	□
Automatismo de separación	□
Separador de amalgama	□
Botella de agua fresca autónoma	□
Botella de agua fresca con conexión a la red pública	□
Calentador de agua	□
Sistema de limpieza con agua de mangueras de aspiración	□

Opciones de luz de trabajo	
LEDlight	□S, A
LEDview Plus	□I, T
Luz de techo LEDview Plus	□
Adaptación para combinación de techo LEDview Plus/Heliodont Plus	□
Adaptación para el modelo de dispositivo Heliodont Plus	□

Comunicación con el paciente	
Interfaz USB en el elemento odontológico o auxiliar	□SiR, SiS
SiroCam F	□SiS
SiroCam AF	□
SiroCam AF+	□
Montaje de la pantalla en la barra de la lámpara	□SiS
Pantalla 22" AC (con bloque de alimentación integrado)*	□SiS*
Interfaz de red	□SiR, SiS

■ Incluido en la unidad básica  
 □ Opcional  
 - No es posible/No se aplica  
 SiR Paquete Sivision Ready  
 SiS Paquete Sivision Start  
 SiS\* Paquete Sivision Start con pantalla  
 S Paquete Start  
 A Paquete Advance  
 I Paquete Innovation  
 E Paquete Endo Pro  
 Er Paquete Ergo  
 T Paquete Touch Plus



Taburete Hugo



Taburete Carl



Taburete Paul (en la imagen, con aro reposapiés adicional)



Portabandeja giratorio adicional para elemento odontológico CS



Portabandejas giratorio adicional para elemento odontológico TS



Apoyacabezas de doble articulación



Lámpara de polimerización Satelec Mini LED



Negatoscopio



Soporte adicional para la cámara (en el elemento odontológico TS)



Elemento auxiliar Confort



Mando de pedal electrónico C+




Apoyacabezas plano



Juego de válvulas para dispositivos externos



Adaptación para el modelo de dispositivo Heliodont Plus

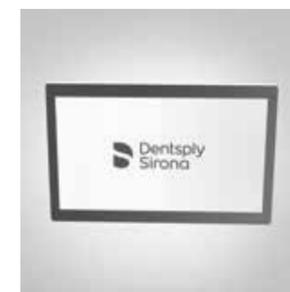

Pantalla 22" AC



Intego sin escupidera



LEDlight



LEDview Plus



SiroCam AF



SiroCam AF+

La disponibilidad de opciones y características puede variar de un país a otro.

## Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH  
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Alemania  
[dentsplysirona.com](http://dentsplysirona.com)

## Procedural Solutions

Preventive  
Restorative  
Orthodontics  
Endodontics  
Implants  
Prosthetics

## Enabling Technologies

CAD/CAM  
Imaging  
Treatment Centers  
Instruments